



Breathe Right® Nenäteippi.

Lue tämä pakkauseloste huolellisesti, ennen kuin käytät **Breathe Right Nenäteippiä**. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

1. Mikä Breathe Right Nenäteippi on, ja mihin sitä käytetään?

Lääketeetön **Breathe Right Nenäteippi** on kliinisesti testattu avaavan nenän käytävät välittömästi, niin että voit hengittää helpommin. **Breathe Right Nenäteippi** on joustavaa jousimaista teippiä, joka kohottaa ja aukaisee nenän käytävät hellävaraisesti mandollistaan paremman ilmavirtauksen.

Breathe Right Nenäteippiä voi käyttää päivällä tai yöllä allergiasta tai vilustumisesta johtuvaan tukkoisuuteen.

Suositteluaan käytettäväksi, jos kärsit:

- Nenän tukkoisuudesta:

Breathe Right Nenäteippi avaa nenän ja helpottaa hengittämistä lievittäen väliaikaisesti vilustumisen tai allergian aiheuttamaa nenän tukkoisuutta.

Breathe Right Nenäteippi voi väliaikaisesti lievittää vinon nenäseinämän aiheuttamaa tukkoisuutta tai hengitysvaikeuksia. Se ei ole vaihtoehto kirurgiselle toimenpiteelle.

- Kuorsaamisesta:

Helpottamalla hengittämistä nenän kautta, suun kautta hengittämisen sijaan, **Breathe Right Nenäteippi** voi vähentää tai jopa estää kuorsausta. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sitä on suositeltavaa käyttää öisin.

Breathe Right Nenäteippiä voi käyttää minkä tahansa lääkityksen kanssa.

2. Miten Breathe Right Nenäteippiä käytetään

Kertakäyttöinen - jokaista teippiä tulee käyttää vain kerran. Voidaan käyttää päivällä tai yöllä. Laastarin asettaminen oikein varmistaa, että saat parhaimman tuloksen. Ole huolellinen että et aseta teippiä liian korkealle tai matalalle. Erittynen jousimainen teippi avaa nenäkäytävät hellävaraisesti.



1 Puhdistus: pese ja kuivaa nenä poistaaksesi lian ja rasvan nenästä. (Rasvaiselle iholle, käytä kuivattavaa puhdistusainetta.)



2 Asetus: poista suoja ja aseta teippi nenälle.



3 Kiinnitys: paina päät alas ja hiero kevyesti teipin kiinnittämiseksi.

4 Poistaminen: Poista **Breathe Right Nenäteippi** puhdistamalla kasvat lämpimällä vedellä tai ollessasi suihkussa. Irrota teippi aina hitaasti. Irrota teipin päät ja nosta varovasti kummaltakin puolelta. Poista teippi huolellisesti vedellä välttääksesi ihon ärsyntyneen tai vaurioituneen.

3. Turvallisuutesi vuoksi

Varoitukset ja varoitoimet.

- Vain ulkoiseen käyttöön.
- Älä käytä haavaumille, auringon polttamalle tai ärsyntyneelle iholle.
- Lopeta teipin käyttö, jos sinulla ilmenee ihottumaa tai ihoärsytystä.
- Ei saa käyttää yli 12 tuntia vuorokaudessa.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi jokaista teippiä saa käyttää vain kerran. Poistamisen jälkeen teippi menettää tarttuvuutensa eikä pysy paikoillaan.

Pienet / keskisuuret nenäteipit sopivat 75%: iin nenistä, suuret nenäteipit ovat aikuisille, joilla on suurempi nenä.

Erittynen jousimainen teippi nostaa varovasti avoimet nenäkäytävät. Käytä kirkasta vaihtoehtoa kuivalle / herkälle iholle.

- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Ei alle 5-vuotiaille lapsille.
- Tämän tuotteen pakkaus sisältää luonnonkumia (lateksia), joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.
- Jos sinulla on kysyttävää tämän tuotteen käytöstä, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

ÄLÄ KÄYTÄ

Jos olet yliherkkä lateksille tai **Breathe Right Nenäteippiille**.

Uniapnea: **Breathe Right Nenäteippi** ei ole tarkoitettu uniapnean hoitoon. Henkilöiden, joilla esiintyy uniapnean oireita, tulee kysyä neuvoa lääkäriltä.

Jotkut henkilöt voivat saada haittavaikutuksia käyttäessään **Breathe Right Nenäteippiä**. Nämä voivat olla käyttökohdan reaktioita (esim. punoitusta, ärsytystä, kipua, ihon hilseilyä, kuorautumista, verenvuotoa, rupeutumista tai värjäytymistä) ja yliherkkyysoireita kuten ihottuma, kutina ja kasvojen turvotus.

Kaikista tästä tuotteesta johtuvista vakavista haittavaikutuksista on ilmoitettava valmistajalle sekä Fimeaan, s-posti: laitevaarat@fimea.fi. On tärkeää ilmoittaa haittavaikutuksista, sillä se voi auttaa havaitsemaan tämän lääkinällisen laitteen virheet ja estää vastaavien tapausten toistumisen.

4. Miten Breathe Right Nenäteippiä säilytetään



Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Tuotetta ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Hävitä tuote paikallisten vaatimusten mukaisesti ympäristö huomioiden.

5. Lisätietoja

Nenäteipit on pakattu yksittäispakkausiin, jotka on suljettu liimalla. Suljetut yksittäispakaukset on pakattu pahvikoteloon.



Varoitus: Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue pakkauksessa oleva käyttöohje huolellisesti.



Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.



Kertakäyttöinen: Nenäteippiä tulee käyttää vain kerran.



Suojapaperi saattaa sisältää luonnonkumia (lateksia).



Eränumero: Katso pakkaus.



Viimeinen käyttöpäivä on muodossa VVVV-KK



Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, USA.



Brandshapers Ltd, Ardavan, Co. Wexford, Y35 Y19A, Ireland.

Medifront Oy, P.O. Box 20, FI-03601, Karkkila, Finland.

www.breatheright.com



Lääkinällinen laite: helmikuu 2021.

Tavaramerkit omistaa tai niiden lisenssinhaltija on FCB.
©2021 FCB tai lisenssinhaltija.